


Gebruiksaanwijzing


Qufora[®] Hulp- en zorgprogramma Irrigatiesysteem met ballonkatheter

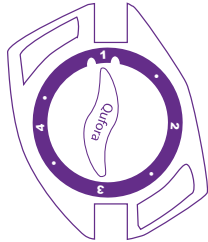

Controle unit


Draai de controle unit naar positie 1,2,3 en 4 in overeenstemming met hoe de irrigatie procedure vordert.

1

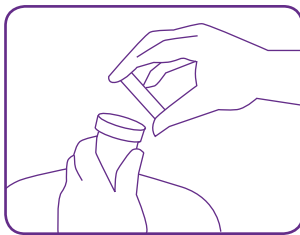


Vul de waterzak met lauwwarm water (36° C - 38° C). Sluit daarna de waterzak af met de schroefdop.

2

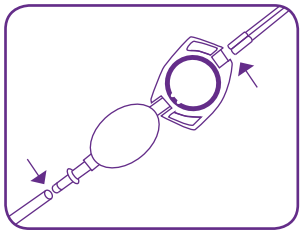


Bevestig de slang van de waterzak aan de handpomp. Bevestig het witte uiteinde van de slang aan de controle unit.

3

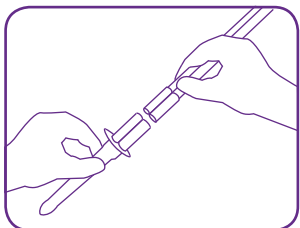


Bevestig het grijze uiteinde van de slang aan de katheter.

4

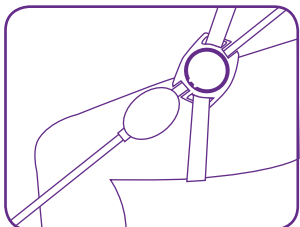


De controle unit kan, indien gewenst, worden bevestigd aan het bovenbeen met de beenband.

5

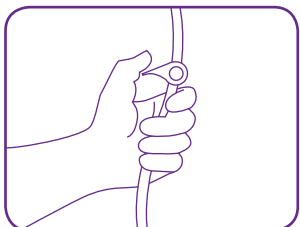


Zet de controle unit op positie 1.
Open het ventiel op de waterzak.

6

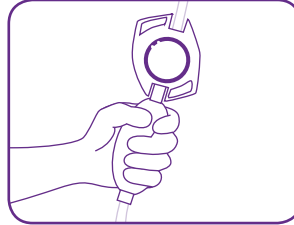

Pomp tot er water uit de katheter komt, ter ontluchting van het systeem. Zorg dat de handpomp volledig gevuld is met water. **Draai de controle unit naar de positie tussen 1 en 2.**

7

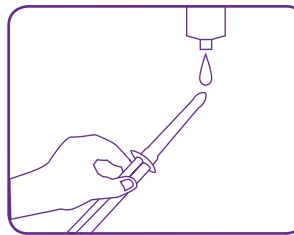


Smeer de top van de katheter in met glijmiddel op waterbasis.

8




Voer de katheter in de endeldarm, tot aan de 'stop-schijf' aan het einde van de katheter.

9

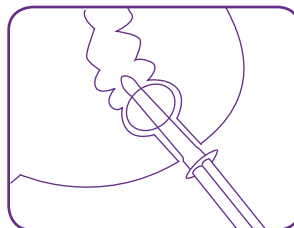


Draai de controle unit verder door naar positie 2.
Pomp water in de ballon.

10

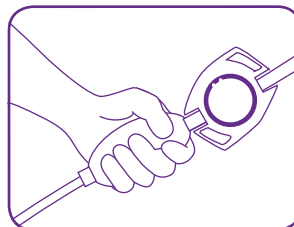

Draai de controle unit verder door naar positie 3.
Het water stroomt in de darm(zwaartekracht). Indien nodig kan men de handpomp gebruiken.

11

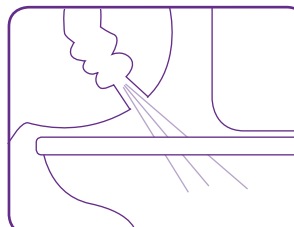

Draai de controle unit naar positie 4.
Blijf op het toilet zitten. De ballon loopt leeg – u kunt nu de katheter verwijderen. Sluit het ventiel (zie plaatje 5).